

Becht Suction plus

Konzentrat

Anwendungsbereich

Geeignet zur Desinfektion, Reinigung und Desodorierung von zahnärztlichen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider sowie Mundspülbecken.

Anwendung

Zur Herstellung einer 2%-igen Gebrauchslösung 20 ml Becht Suction plus in ein Behältnis geben und mit 980 ml Wasser vermischen. Danach die Anlage durchsaugen. Mindesteinwirkzeiten beachten und System anschließend gründlich mit Wasser durchspülen. Zur Aufrechterhaltung der hygienischen Sicherheit mittags und nach Behandlungsschluss verwenden. Lösung sollte nicht über das Wochenende in der Absauganlage verbleiben. Mundspülbecken: Mit 50 ml Gebrauchslösung desinfizieren und reinigen. Mit Wasser nachspülen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid in 2%/5 Minuten unter hoher organischer Belastung (EN 13727/14562)
- inaktiviert Vaccinia-Viren und BVDV (EN 14476) bei 3%/15 Minuten
- wirkt tuberkulozid (*M.terrae*) in 2%/30 Minuten unter hoher organischer Belastung (EN 14348)
- schaumarmes Flüssigkonzentrat
- frei von Phenolen, Aldehyden und Aktivchlor
- Gebrauchslösung ist biologisch abbaubar
- löst Schmutzablagerungen aus den Absaugschläuchen
- sehr gute Materialverträglichkeit
- pH-Wert: ~ 12

Zusammensetzung

100 g Becht Suction plus enthalten:

- 3,5 g Benzalkoniumchlorid

Lieferform

REF 564 Flasche mit 1 Liter Konzentrat

REF 564.5 Kanister mit 5 Liter Konzentrat

Gutachten / Prüfberichte

Bakterizidie (EN 13727):

- Prof. Dr. med. H.-P- Werner / Bischofshofen / 2016

Levurozidie (EN 14562):

- Prof. Dr. med. H.-P- Werner / Bischofshofen / 2016

Tuberkulozidie (EN 14348):

- Prof. Dr. med. H.-P- Werner / Bischofshofen / 2016

BVDV, Vaccinia-Virus (EN 14476):

- Prof. Dr. med. H.-P- Werner / Bischofshofen / 2016



Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
CE Certificate: G1 17 09 49628 010
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Zubehör

REF 567.5 Dosierpumpe für
5 Liter Kanister



REF 567.51 Ausgießer für
5 und 10 Liter Kanister



Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de